



SCHEDA TECNICA

Edizione del 11.10.2013



SEKUFILM A - B

FILM PROTETTIVO MONOUSO PER USO ODONTOIATRICO

IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICANTE :

SOGEVA S.r.l.
VIA PRIMO MAGGIO TRAV 3 NR 18
25035 OSPITALETTO (BS)

DESCRIZIONE

Il film protettivo monouso è prodotto in PE e costituisce l'ideale barriera contro i rischi di contaminazione. E' estremamente adattabile ad oggetti di forma diversa, quali turbine, cordoni, manipoli, siringhe, micromotori e tubi di raccordo (tutti dispositivi ad uso dentale).

Il prodotto è disponibile con larghezze differenti:

- ❖ **SEKUFILM A** – larghezza 5,5cm e rotolo lungo 45cm;
- ❖ **SEKUFILM B** – larghezza 4,5cm e rotolo lungo 45cm;

DESTINAZIONE D'USO

Le principali applicazioni del film protettivo monouso sono su :

1. SIRINGHE ARIA / ACQUA;
2. MICROMOTORI;
3. TUBI DI RACCORDO;
4. MANIPOLI;
5. CORDONI;
6. TURBINE.

MODALITA' D'USO

- ❖ Rimuovere la linguetta del dispenser.
- ❖ Lasciare il SEKUFILM nel dispenser. Inserire la fine del SEKUFILM attraverso l'apertura del dispenser.
- ❖ Strappare sulla linea di pretaglio e aprirne la fine. Posizionare il SEKUFILM sull'apparecchio.
- ❖ Sostituire il SEKUFILM dopo ogni paziente.
- ❖ Questo prodotto è MONOUSO – NON STERILE.
- ❖ Questo prodotto è ad uso DENTALE.

SOGIVA S.r.l.
L'Autore
Sala Enrico